

Rašelinové polštářky



Návod k používání

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Použití

Vhodné pro teplou i chladivou aplikaci. Dokonale prohřeje a uvolní bolavá místa na těle. Eliminují bolesti a nepříjemné pocity. Lze používat opakovaně. Jednoduchá aplikace pomocí elastických pásků a suchého zipu (některé modely).

Náplň rašelina (zaručuje dlouhodobé udržení požadované teploty)

Hřejivá terapie

Na bolest / ztuhlá místa

Nezánětlivé bolesti kloubů a svalů, při revmatických potížích.

Svalové napětí / svalové křeče

Bolesti břicha u dětí, menstruační bolesti

Chladivá terapie

Na bolest / otoky

Na naraženiny / modřiny

Bolest hlavy / bodnutí hmyzem

Bolesti zubů

POSTUP PRO NAHŘÍVÁNÍ

Rašelinové polštářky nahřívejte v mikrovlnné troubě při nastavení výkonu na 800 W

a) Rašelinový polštářek na záda

Maximální celková doba ohřevu je 75 sekund. Postupujte tak, že nastavíte nejdříve 45 sekund a pokud požadujete intenzivnější nahřátí můžete přidat jeden až dva další 15 sekundové intervaly.

b) Rašelinový polštářek na koleno/loket.

Maximální celková doba ohřevu je 60 sekund. Postupujte tak, že nastavíte nejdříve 30 sekund a pokud požadujete intenzivnější nahřátí můžete přidat jeden až dva další 15 sekundové intervaly.

c) Rašelinový polštářek na hlavu

Maximální celková doba ohřevu je 50 sekund. Postupujte tak, že nastavíte nejdříve 30 sekund a pokud požadujete inten-

zivnější nahřátí můžete přidat jeden až dva další 10 sekundové intervaly.

d) Rašelinový polštářek univerzální

Maximální celková doba ohřevu je 60 sekund. Postupujte tak, že nastavíte nejdříve 30 sekund a pokud požadujete intenzivnější nahřátí můžete přidat jeden až dva další 15 sekundové intervaly.

UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte celkovou maximální dobu ohřevu!!! Mohlo by dojít k poškození polštářku. Na poškození výrobku tímto způsobem se nevztahuje záruka.

POSTUP PRO NACHLAZENÍ

Polštářky můžete nachladit v chladničce nebo intenzivněji v mrazáku. Při nachlazení v mrazáku doporučujeme polštářek ještě vložit do igelitového sáčku. Abyste předešli omrzlinám, které mohou nastat pokud je polštářek příliš studený, odložte polštářek dokud nebude mít teplotu, kterou vaše pokožka toleruje. Pokud naopak polštářek chladí málo, vložte jej na dalších 20 minut do mrazáku.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Položte na postiženou oblast maximálně na 20 min, mezi jednotlivými použitími dodržujte 20 minutové přestávky! Obsah polštářku neochutnávejte! Polštářek nepřehřívejte. Nahřátí déle než je doporučena doba může způsobit fyzickou bolest nebo poškození výrobku i vaší mikrovlnné trouby. Dejte pozor při vyjímání polštářku z mikrovlnné trouby, může být horký! Pokud je pro vaši pokožku polštářek příliš horký, vyčkejte, až trochu zchladne a poté aplikujte na postiženou oblast. Zkuste teplotu polštářku nejdříve rukou, než jej aplikujete. Při nesprávném používání může dojít k popáleninám nebo omrzlinám! Nepoužívejte během spánku. Průběžně kontrolujte pokožku během použití polštářku. Pokud zaznamenáte po-

dráždění pokožky nebo spálení, okamžitě polštářek sejměte. Nepoužívejte v případě, že je polštářek jakkoli poškozen a může dojít k úniku jeho obsahu. Spolu s polštářkem nepoužívejte žádné další odstraňovače bolesti, léčivá tělová mléka, krémy nebo masti. Nepoužívejte na jakkoli poškozenou pokožku, zlomeniny, na nezdravou kůži. Neaplikujte na modřiny a otlačky, ke kterým došlo před 48hod, ani na místa kde nejste schopni rozeznat teplo nebo chlad polštářku. Polštářek nesmí používat osoby, které nejsou schopny dodržet bezpečnostní pokyny, jako jsou děti, kojenci nebo velmi staré osoby.

Nevyvíjejte na polštářek přílišný tlak. Obsah nepolykejte! Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Pokud by horký nebo studený obsah polštářku přišel do kontaktu s očima, okamžitě jej sejměte, vypláchněte oči vodou a vyhledejte odbornou pomoc. Přestaňte používat a kontaktujte lékaře, pokud se bolest zhoršuje nebo přetrvává déle než 7 dní. Pokud je vám používání polštářku jakkoli nepříjemné, zaznamenáte změny na pokožce, vyrážku atd. okamžitě s jeho používáním přestaňte.

Konzultujte používání polštářku v případě, že jste diabetik, osoba se špatným oběhem krve, srdeční chorobou, artritidou nebo pokud jste těhotná.

Pokud je polštářek pro vaši pokožku příliš studený nebo naopak teplý, přestaňte s používáním, dokud nebude mít přiměřenou teplotu. V případě jakéhokoli poškození polštářku jej nepoužívejte! Čistěte pouze dle instrukcí níže. Očistěte pouze vlhkým hadříkem a poté osušte! Nelze prát v pračce!

Vyhodte v případě jakéhokoli poškození, roztržení nebo otvorů v polštářku!

Obsah polštářku není nebezpečný odpad, likvidujte dle standardních požadavků.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu.

Za účelem správné likvidace výrobku jej odvezte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.